

Kurzanleitung

Putzen Sie Ihre Zähne und spülen Sie sie mit Wasser aus.
Drehen Sie die Rückseite des Gelstifts .
Tragen Sie das Gel auf die Zahnoberfläche auf.
Nehmen Sie das LED-Mundstück in den Mund und beißen Sie sanft hinein



W
WHITE
ROYALE

Schalten Sie das LED-Licht ein*:

- 15-minütige Behandlung (Blauer Modus)
- 10-minütige Behandlung (Blau- und Rotmodus)

Spülen Sie Ihren Mund anschließend noch einmal aus.

Entnehmen Sie den Gummiaufbiss des LED Handstückes und spülen Sie nur dieses mit Wasser ab.

DAS AUFHELLUNGSVERFAHREN

1. Spülen Sie das LED-Mundstück vorsichtig mit Wasser ab (nicht über den Ein-/Ausschalter).
2. Zähne putzen und mit Wasser ausspülen.
3. Drehen Sie den unteren Teil des Zahnaufhellungsstifts, bis das Gel in den Borsten erscheint.
4. Tragen Sie das Gel gleichmäßig auf die oberen und unteren Zähne auf.

! Tragen Sie nicht zu viel Gel auf, mehr Gel beschleunigt den Vorgang nicht und führt nicht zu besseren Ergebnissen!

5. Nehmen Sie das LED-Mundstück in den Mund und beißen Sie sanft darauf, schalten Sie das Licht ein.
 - Blauer Modus für eine 15-minütige Behandlung.
 - Blau- und Rotmodus für eine 10-minütige Behandlung.
6. Das Whitening-LED-Gerät schaltet sich automatisch aus (nach 15 Minuten im Blau-Modus und nach 10 Minuten im Blau- und Rot-Modus).
7. Nehmen Sie das LED-Mundstück heraus und spülen Sie Ihren Mund und den Gummiaufbiss (vom Handstück zur Reinigung zu entnehmen) des LED-Mundstückes mit Wasser ab.
8. Essen und trinken Sie 30 Minuten nach Beendigung der Behandlung nichts außer Wasser.

* Wenn Sie nach der Verwendung des Rot- und Blau-Modus eine Zahnpfempfindlichkeit bemerken, versuchen Sie es mit dem Blau-Modus.

Häufigkeit:

Wir empfehlen zwei Aufhellungssitzungen pro Tag, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Zusammensetzung des Aufhellungsgels:

PEG, Wasser, Wasserstoffperoxid, Poloxamer, t-Butylalkohol, Etidronsäure, Pfefferminzöl, EDTA, Natriumstannat.

Anwendungsbereich:

Zur Entfernung von Zahnverfärbungen durch Kaffee, Tabak, Lebensmittelfarben, Alterung und andere Faktoren, die zu Verfärbungen führen können.

Lagerung:

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Die Stifte müssen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Warnhinweise & Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht verwenden, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind. Nicht verwenden, wenn Sie überempfindliche Zähne haben. Das Produkt sollte ausschließlich zum Aufhellen Ihrer Zähne verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Zähne locker sind. Das Aufhellungsgel hellt keine vorhandenen Zahnrestorationen wie Füllungen, Kronen, Veneers oder Brücken auf. Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Nicht verwenden, wenn Sie gegen einen der oben aufgeführten Inhaltsstoffe allergisch sind. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht schlucken.

1. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit weichem Gewebe wie Zahnfleisch und Lippen, indem Sie überschüssiges Gel außerhalb des LED-Mundstückes abwischen, nachdem Sie es in den Mund eingeführt haben. Überschüssiges Aufhellungsgel kann dazu führen, dass sich das Zahnfleisch rot oder weiß verfärbt. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Spülen Sie es einfach mit Wasser ab und das Zahnfleisch nimmt nach einigen Tagen wieder seine normale Farbe an.
2. Wenn das Aufhellungsgel auf Ihr Gesicht oder Ihre Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort abwaschen.
3. Setzen Sie die Kappe nach der Aufhellungsbehandlung immer wieder auf den Stift, um eine Verflüchtigung der Wirkstoffe zu vermeiden.
4. An einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

Dieses WHITE ROYALE PREMIUM PERFECTION+ WHITENING KIT besteht aus dem intelligenten LED-Mundstück und drei Bleaching-Stiften mit 6 % Wasserstoffperoxid Superior für makellose Bleaching-Ergebnisse.

Das smarte LED-Mundstück verfügt über zwei Anwendungsmodi. - Der Blue-Modus nutzt eine spezielle Kaltlichttechnologie für ein Standard-Bleaching-Verfahren. - Der Blau- und Rot Modus erhöht die Temperatur leicht und beschleunigt so den Vorgang. - Das einzigartige Soft-Touch-LED-Mundstück wurde unter Berücksichtigung der menschlichen Mundanatomie für eine perfekte Passform entwickelt. Es ist während einer Bleaching-Sitzung sehr angenehm zu tragen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das smarte LED-Mundstück verwenden!

Dieses Kit enthält: Intelligentes LED-Mundstück (32 LEDs). Mit Ladekabel Aufhellungsstifte (3 x 2 ml) mit 6 % Hydrogen Peroxide Superior Gel (HPS) Bedienungsanleitung.