

# PROTOKOLL - CAVEX VACUFORMER



Das Heizelement nach hinten drehen, den Rahmen mithilfe der beiden schwarzen Griffe vollständig nach oben schieben und öffnen.



Tiefziehfolie in den Rahmen legen. Rahmen verschließen und den schwarzen Knopf festziehen. Das Gipsmodell in die Mitte der Vakuumplatte legen (ein Gipsmodell verwenden, bei dem nur der Zahnkranz ausgegossen ist).



Das Heizelement nach vorn bis über den Rahmen drehen. Den Timer auf ca. 10 Minuten und den Schalter auf HEATING (-) einstellen. Das Gerät vorheizen lassen.



Die Tiefziehfolie erwärmt sich jetzt und sackt allmählich durch.



Wenn die Folie 1,5 bis 2 cm durchgesackt ist, den Schalter auf VACUUM (=) stellen, den Rahmen ruhig nach unten bringen, über das Gipsmodell drücken und das Heizelement nach hinten drehen.



Den Vakuummotor noch 30 bis 60 Sek. laufen lassen und dann ausschalten. 2 bis 5 Min. warten und dann den Rahmen öffnen. Die Abkühldauer variiert je nach Tiefziehfolie.

7 Zum Öffnen des Rahmens den schwarzen Knopf an der Vorderseite lösen. Das Werkstück kann jetzt ausgeschnitten und dann mit Poliergummis und -bürsten nach Wahl bearbeitet werden.

## Allgemeine Hinweise

- Niemals vorheizen! Immer mit einem abgekühlten Gerät beginnen.
- Den Rahmen nur mit beiden Händen an den schwarzen Griffen nach oben oder unten bewegen.
- Häufig gestellte Fragen finden Sie auf [www.cavex.nl/vacuformer](http://www.cavex.nl/vacuformer)

## Mundschutz

- Für höheren Tragekomfort den Mundschutz bis zum Ende des ersten oder zur Mitte des zweiten Molars kürzen.
- Rändern mithilfe eines Gasbrenners mit blauer Flamme einen ansprechenden Glanz verleihen.



## Splint und Splint +

- Vor der Verwendung die blaue Folie an beiden Seiten entfernen.
- Splint an den Elementen kurz abschneiden oder -schleifen, um ihn vom Gipsmodell nehmen zu können.



## Bruxism und Splint X-heavy

- Kühl und trocken lagern; das Material ist leicht hygroskopisch.
- Vor der Verwendung die blaue Folie an beiden Seiten entfernen.
- Ausschneiden z. B. mit einer 10-mm-Schleifscheibe.



## Bleach und Bleach Heavy

- Die zu bleichenden Elemente mit Cavex Bite&White Barrier/Spacer auf dem Gipsmodell fixieren, damit kein Bleaching-Gel auf die Gingiva gelangen kann.
- Vor der Verwendung die blaue Folie an beiden Seiten entfernen.
- Mit dem Bleaching-Löffel alle Elemente bedecken und den Löffel für maximalen Tragekomfort ca. 0,5 cm über oder unter den Elementen abschneiden.



## Cavex Bite&White Barrier / Spacer

Mithilfe von Cavex Bite&White Barrier/Spacer in den Bleaching-Löffeln Zwischenräume kreieren

- Barrier/Spacer an den labialen, buccalen und inzisalen Flächen der zu bleichenden Elemente dünn auf das Gipsmodell auftragen.
- In einer Schicht von 1 mm auftragen.
- Dabei einen Abstand von 1 mm zum Gingivarand einhalten.
- 20 Sek. lang mit Licht aushärten.



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

ZV911.02