

- Die Spitze heizt sich in Sekundenschnelle auf und die Guttapercha-Spitze lässt sich schnell und sauber schneiden.
- Nach dem Abschneiden der Spitze den Bedienknopf loslassen. Die Schneidspitze kühlt sofort ab und kann aus dem Mund des Patienten entfernt werden. Der Bedienknopf ist ein „Kontaktknopf“, der nur einschaltet. Beim Loslassen des Knopfes schaltet sich das Gerät ab.
- Nach Gebrauch die Schneidspitze vom Handstück abnehmen.  
**Wichtig:** Bitte den Knopf nicht länger als 30 Sekunden gedrückt halten.

#### **Reinigung und Sterilisation**

Vor jedem Einsatz bei einem Patienten müssen die Schneidespitzen gereinigt und sterilisiert werden.

Eventuelle Guttaperchareste, die sich noch an der Gerätespitze befinden, können durch vorsichtiges Abwischen mit einer Watterolle entfernt werden.

Bei sachgemäßer Anwendung können die Schneidespitzen maximal 25 Mal autoklaviert werden. Die Sterilisationszeit ist abhängig von der Sterilisationstemperatur (bei 121°C mindestens 20 Minuten und bei 132°C/134°C mindestens 5 Minuten).

#### **Fehlerbehebung**

Wenn sich die Schneidspitze nach dem Drücken des Bedienknopfes nicht sofort erwärmt, überprüfen Sie die elektrischen Kontakte an der Schneidspitze. Wenn diese defekt sind, tauschen Sie die Schneidspitze gegen eine neue aus. Wenn die LED am Handstück während des Ladevorgangs nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob die Ladestation an das Stromnetz angeschlossen ist oder überprüfen Sie die Stromversorgung selbst.

#### **Vertrieb durch:**

Dental Contact Vertriebs KG | Im Spiet 101 | 26506 Norden

## **C-BLADE**

### ***gutta cutter***

#### ***Gebrauchsanweisung***

Dieses kabellose Gerät mit auswechselbaren Einsätzen dient zum schnellen, präzisen und sicheren Abschneiden überschüssiger Guttapercha-Spitzen. Das Handstück kann für bis zu ca. 80 Anwendungen verwendet werden, ohne es erneut in die Ladestation einzusetzen und ist somit immer schnell einsatzbereit.

#### **Standardkonfiguration**

Cutter Handstück  
Steckdosen & Ladestation  
4 Schneidspitzen

#### **Technische Parameter**

Abmessungen des Handstücks:

Länge: 12,6 cm (ohne Schneidspitze), <t>: 1,9 cm  
Netzspannung: 230 V/50 Hz; 110 V/60 Hz

#### **Anwendungshinweis**

Dieses Gerät ist für das schneiden von Guttapercha-Spitzen vorgesehen.

#### **Warnhinweise**

1. Dieses Gerät muss in strikter Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

## **Verwendung**

Wenn Sie eine externe Stromversorgung verwenden, stellen Sie sicher, dass sich die Spannung des Netzteils an den markierten Spannungsbereich anpasst.

Eine falsche Spannung würde das Gerät beschädigen und eine Gefahr für den Patienten und/oder den Bediener verursachen.

Um das Verletzungsrisiko zu vermeiden, lassen Sie die Spitze nicht mit den Lippen, dem Zahnfleisch oder der Schleimhaut des Mundes des Patienten in Kontakt kommen. Benutzen Sie einen Kofferdam.

**Brandgefahr:** Lassen Sie die erhitzte Spitze oder das Handstück nicht mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in einer Umgebung geeignet, die brennbare Gase enthält.

Tauchen Sie das Handstück und die Ladestation nicht in Flüssigkeit.

Bitte beachten Sie, dass die während einer Behandlung zu wechselnden Schnittpitzen noch heiß sein können.

Wenn Flüssigkeit aus dem Gerät austritt (möglicherweise vom Akku), stoppen Sie die Arbeit sofort und senden Sie das Gerät an ein autorisiertes Servicecenter, um den Akku zu tauchen. Es ist gefährlich, das Gerät zu verwenden, wenn der Akku defekt ist.

Es ist gefährlich, das Gerät für den Akkuwechsel zu öffnen. Wenn Sie das Gerät öffnen, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nur für die Benutzung von Fachpersonal zugelassen.

## **Vorsichtsmaßnahmen:**

Biegen Sie die Spitze niemals, solange sie sich noch im Handstück befindet.

Sie Anwendung von übermäßiger Kraft während der Behandlung wirkt sich nachhaltig auf die Lebensdauer der Schneidespitzen aus.

## **Vorbereitungen**

1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzspannung mit der für das Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Laden Sie das Gerät zunächst auf, indem Sie die Ladestation an eine Steckdose anschließen.
3. Stellen Sie das Handstück in die Buchse in der Ladestation. Während das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die LED auf dem Handstück.

## **Anleitung zur Verwendung mit Ni-MH-Akku**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist. Dieser Vorgang dauert 12 Stunden.

Entladen Sie die Ni-MH-Akku immer vollständig, bevor Sie sie vollständig aufladen. Diese gewährleistet eine optimale Lebensdauer Ihres Gerätes.

Abhängig von der Häufigkeit der Verwendung beträgt die Lebensdauer des Akkus 2 Jahre.

Vermeiden Sie es, den Akku länger als nötig aufzuladen, um den vollen Ladezustand zu erreichen. Laden Sie niemals länger als 12 Stunden.

## **Nutzung**

Befestigen Sie eine Schneidespitze auf dem Handstück. Stellen Sie sicher, dass der Winkel der Spitze in die entgegengesetzte Richtung zum Bedienknopf zeigt. Dies erleichtert die Arbeit.

**Wichtig:** Biegen Sie die Spitze niemals, solange sie sich noch im Handstück befindet.

Führen Sie die Schneidespitze in den Hohlraum ein, solange sie kalt ist (ohne den Bedienknopf zu drücken). Der abzuschneidende Gutta-Percher-Pink muss durch die Schlaufe der Schneidespitze eingekreist sein.

Sobald sich die Schneidespitze direkt am Kanalzugang befindet, drücken Sie die Bedientaste.