

PREMIUM RESTORATIVES

# CAVEX TEMPORARY CEMENT

-  
Eugenolfreier Zement zum Zementieren von  
provisorischen Kronen und Brücken.



**YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY**

**CAVEX**

# PREMIUM RESTORATIVES

## CAVEX TEMPORARY CEMENT

Ein temporärer Zement muss zuverlässig sein und wirksamen Schutz bieten. Außerdem muss er sich leicht auftragen und rückstandsfrei entfernen lassen. Cavex hat die ideale Lösung entwickelt, die all diese Anforderungen erfüllt: CAVEX Temporary Cement. Die Eigenschaften des Zements machen ihn ideal zur Befestigung provisorischer Kronen und Brücken. Cavex Temporary Cement ist einfach in der Anwendung, geruchlos und ästhetisch.

### Perfekt abgestimmte Eigenschaften

Cavex Temporary Cement wurde eigens zur Befestigung provisorischer Kronen und Brücken entwickelt. Er sorgt dafür, dass der präparierte Zahn

vollständig versiegelt ist, was bakterielle Infektionen verhindert. Der Zement ist außerdem eugenolfrei und hat daher keine Auswirkungen auf Komposite.

### Anwendung

Nehmen Sie zwei gleiche Teile aus der Basis- und der Katalysatortube und mischen Sie diese mit dem Spatel 30 Sekunden lang zu einer homogenen Paste. Die Paste hat eine zweiminütige Abbindezeit im Mund, danach sollte der Überschuss entfernt werden. Die gesamte Abbindezeit des Zements beträgt fünf Minuten.

### Eigenschaften

- Einfach im Gebrauch
- Eugenolfrei
- Gut erkennbare Farbe
- Perfekte Abdichtung
- Geringe Löslichkeit
- Schnell aushärtend
- Leicht zu entfernen



# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX